

# BRUKERVEILEDNING

for

## Timestokken 20 minutter med lydregulering

Varenr: 500 114

Varenr: 500 118 med belteklips



*Versjon juni 2006*

CE

## Timestokken 20 minutter

Timestokken 20 minutter er et timeglass som viser tiden konkret ved hjelp av lysprikker. En lysende prikk tilsvare 1 minutt.

### Slik bruker du denne Timestokken

Trykk på den knappen som tilsvare ønsket tid, for eksempel 15 minutter (Gul Knapp). Da tennes like mange lysende prikker.

Du kan telle ned 20,15,10 eller 5 minutter.

Ved start tennes

- 20 Lysprikker / Rød knapp
- 15 Lysprikker / Gul knapp
- 10 Lysprikker / Grønn knapp
- 5 Lysprikker / Blå knapp

Deretter slukkes en prikk for hvert minutt til alle er slokkt. Da blinker alle prikkene og et kort lydsignal høres fem ganger som tegn på at tiden er utløpt.

Du kan avbryte et pågående lydsignal ved å trykke på en tilfeldig valgt knapp.


Du kan slette en startet nedtelling ved å trykke og holde inne rød og blå knapp samtidig til lyssøylen er slokkt (4 sekunder). Deretter kan du starte en ny nedtelling.

På kortsiden av Timestokken finner du lydreguleringen for endring av lydfrekvens. Når denne er stilt på det laveste, er lyden helt avstengt, og signal blir kun gitt som blinkende prikker.



Endring av lydsignal  
Maks      Min

Timestokken leveres med klistremerker i samme farger som på knappene. Klistrelappene kan brukes for å fargemerke aktiviteten som skal nedtelles.

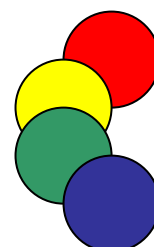

For å fortelle hvilke aktiviteter det er snakk om, kan f.eks. PCS-symboler benyttes.

Disse kan enten fargemerkes med de klistrelappene som følger med, eller med farget ramme rundt symbolene.

Timestokken kan benyttes som personlig støtte ved f. eks. koking av ris, hvilepausens lengde, en økt på trampolinen eller for å avgrense en aktivitet.



### Batteri

Når lysdiodene begynner å lyse svakt er det på tide å skifte batteri.

Leveres med 2 stk. AA alkaline- batterier.

(1,5V type R6)

Disse vil rekke til minst 60 timers bruk.

Ladbare batterier kan også benyttes, men da må en batterilader skaffes. (For eks. Varenr.: 103 520)

Batteriluken finner du på boksens underside. Den er låst med en skrue.

Låseskrue med krysspor



Batterirommet er merket med + og – for at batteriene skal bli plassert riktig vei.

### Teknisk spesifikasjon

Mål (h x b x d): 112 x 66 x 28 mm

Vekt .: 150 g

## Vedlikehold

- Hjelpemidlet er beregnet for innendørs bruk og må ikke være i kontakt med vann
- Hjelpemiddelet kan rengjøres med en klut lett fuktet i lunkent såpevann, men må ikke nedsenkes i væske
- Ta ut batteri ved langvarig lagring
- Når hjelpemidlet eller batteriet skal kasseres, skal det behandles som spesialavfall eller returneres til din leverandør
- Batteribytte ved behov

## Sikkerhet

Falck Igel har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument.

Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør.

Falck Igel AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Falck Igel AS' økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet.

---

Det er ikke tillatt å kopiere denne brukerveiledningen uten skriftlig tillatelse av Falck Igel AS.

Har du problemer med hjelpemiddelet, ring 37 14 94 50.

---

### Falck Igel AS

#### Risør

Buvikveien 22  
4950 Risør  
P.b. 123, 4952 Risør  
Tlf (+47) 37 14 94 50  
Fax (+47) 37 14 94 70

#### Oslo

Tevlingveien 15  
1081 Oslo  
Tlf (+47) 23 28 94 00  
Fax (+47) 23 28 94 01

#### Bergen

Myrdalsveien 22  
5131 Nyborg  
Tlf. +47 55 91 64 30  
Fax +47 55 13 62 20

#### Trondheim

Bromstadvegen 57  
7047 Trondheim  
Mob +47 95 21 66 33  
Mob +47 47 46 27 22  
Fax +47 74 14 59 54

post@falckigel.no  
www.falckigel.no

---