

BRUKERVEILEDNING

for

Cadex Armbåndsurs med alarmer

Varenr. 500 320



Versjon august.2005

CE

Innholdsfortegnelse

Innledning	2
Funksjoner	3
Klokkens 4 hovedmenyer	3
Slik stilles tid og dato	4
Nullstill klokken	4
Alarmbanken	4
Slik settes en alarm	5
Å slå av en enkelt alarm	5
Databanken	6
Slik lagres personlige data	6
Slik aktiveres alarm	6
Slik betjenes hovedbryteren	7
Slik slås alarmen av	7
Bla i databanken	7
Slik slettes tekst	7
Annet	7
Teknisk spesifikasjoner	8
Sikkerhet	8

Innledning

Cadex Armbåndsur er en digital klokke som kan være et godt hjelpemiddel for den som har behov for påminning.

Klokken har mulighet til å sette inntil 12 alarmer i døgnet. Det er også mulig å lagre 11 forskjellige typer informasjon om innehaveren. Dette kan være personnummer, telefonnummer til pårørende og lege etc. Klokken programmeres manuelt.

Funksjoner


Cadex klokken har fire knapper for programmering og en alarmknapp for enkelt å vise innlagte alarmer eller informasjon om brukeren.



- MODE:** Brukes for å bla gjennom klokkenes fire hovedmenyer og for å programmere den.
- ADJUST:** Brukes for å kunne gå inn i programmeringsmeny for tid, alarm og brukerinformasjon.
- FORWARD:** Brukes for å bla framover, stenge en alarm og til programmering av klokken.
- REVERSE:** Brukes for å bla tilbake, stenge en alarm og til programmering av klokken.
- ALERT:** Alarmknappen brukes for å vise programmerte alarmer og personlige data om brukeren.

Klokkens 4 hovedmenyer

Tid og dato → alarmbank → databank → aktivering av alarm
MODE knappen brukes for å bla mellom menyene

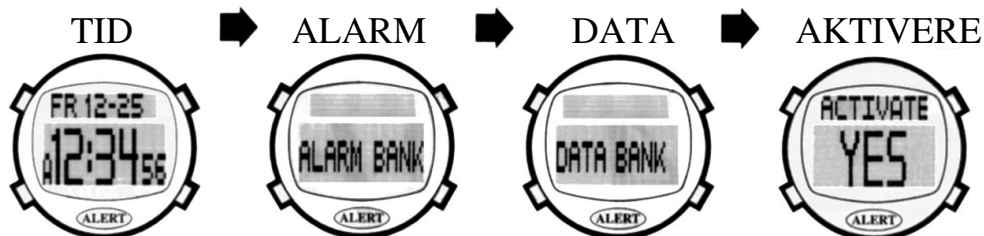

- TIME:** viser tid og dato
- ALARM:** viser lagret alarm
- DATA:** viser informasjon om bruker av klokka
- AKTIVATE :** aktiverer alle alarmer / slår av alle alarmer



Når tidmenyen er valgt, vises aktuell tid og dato. Tiden vises i timer, minutter og sekunder. Dato vises i ukedag, måned og dag.

Etter 5 minutter i en av hovedmenyene vil klokken automatisk gå tilbake til tidmenyen hvis innstillingsknappene ikke er brukt i mellomtiden, eller klokken ikke er i påminnerfunksjon.

Slik stilles tid og dato

1. Trykk på MODE knappen en eller flere ganger til tidmenyen vises i displayet.
Trykk og hold ADJUST knappen i 2 sek til ”timene” begynner å blinke.
2. Bruk FORWARD eller REVERSE knappen for å stille inn ønsket time. OBS: Klokken har 12 timers visning. Trykk med FORWARD/REVERSE knappen helt til displayet viser:
A=AM - formiddag
P=PM – ettermiddag foran klokkeslettet.
3. Trykk MODE knappen for å gå videre til minutter.
4. Bruk FORWARD eller REVERSE knappen for å stille inn minutter og trykk MODE for gå videre til sekunder.
5. Gjør på samme måte for å stille inn år, måned og dag. Klokken vil automatisk stille seg inn på riktig ukedag.
6. Trykk ADJUST knappen for å bekrefte. Denne kan brukes når som helst i programmeringsfasen for å bekrefte endringer som er gjort.

Nullstill klokken

Trykk og hold alle 4 knappene inne i 5 sekunder.
Still klokken på nytt.

Alarmbanken



Cadex Klokken kan lagre opptil 12 daglige alarmer. Disse er nummererte fra 1 til 12, og behøver ikke benyttes i kronologisk rekkefølge, dvs at alarm 1 ikke trenger å være dagens første alarm. Hver alarm kan vise en tekst på inntil 36 tegn.

Slik settes en alarm

1. Trykk MODE knappen en eller flere ganger til ALARMBANK ses i displayet.
Trykk FORWARD eller REVERSE knappen for å velge den alarmen du vil se eller endre. (nummer A1-A12)
2. Trykk og hold ADJUST knappen i to sekunder til alarm du vil sette begynner å blinke. (nummerert A1-A12)
Trykk FORWARD knappen for å slå på alarmen. Da ses ((*)) i displayet.
3. Trykk MODE knappen og ”timer” blinker.
Bruk FORWARD eller REVERSE knappen for stille inn ønsket time.
4. Trykk MODE knappen og ”minutter” blinker
Trykk FORWARD eller REVERSE for stille inn ønsket minutt.
5. Trykk MODE knappen og første ”tegn” blinker.
Bruk FORWARD eller REVERSE knappen for sette inn ønsket tegn i teksten.
Tips: Trykk og hold FORWARD eller REVERSE knappene for å bla automatisk til ønsket bokstav.
6. Trykk MODE for å gå til neste tegn eller lage et tomt tegn.
Gjenta pkt 5 for hvert tegn som settes i teksten.
Tips! Hold nede MODE knappen for å gå tilbake til et av tegnene i teksten.
7. For å slette et tegn, skriv over det med tegnet ”mellomrom”, en blinkende understreking som ligger foran bokstaven A.
8. Trykk ADJUST knappen for å lagre innstillingen og gå tilbake til ALARMBANK.
Trykk FORWARD eller REVERSE for å velge ny alarm. Trykk MODE knappen for å gå videre til annen meny.

Å slå av en enkelt alarm

Man kan slå av en enkelt alarm, for senere å aktivere den igjen. Bruk FORWARD og REVERSE knappene for å velge den alarmen du vil slå av. Hold inne ADJUST knappen i to sekunder til alarmen begynner å blinke. Trykk FORWARD knappen. Symbolet ”((*))” forsvinner fra displayet. Trykk ADJUST for å bekrefte at alarmen er slått av. For å aktivere alarmen igjen, hold ADJUST knappen inne i to sekunder. Trykk REVERSE og ”((*))” ses på displayet. Bekreft med ADJUST.

Databanken

Cadex Armbåndsursur kan lagre følgende informasjon:

Name: Navn og telefonnummer
Alert: Viktig informasjon om f.eks. brukerens
helsetilstand
Allergic: Allergiske reaksjoner
Doctor: Lege og telefonnummer
Contact: Kontaktperson og telefonnummer
Blood: Blodgruppe
Birth: Fødsels og personnummer
Insurer: Forsikringsselskap
Policy: Forsikringsinformasjon
S.S.#: Social Security nummer
Card: Konto kortnummer og gyldighetsdato



Slik lagres personlige data

1. Velg DATABANK meny ved å trykke MODE knappen en eller flere ganger til DATABANK vises.
Bruk FORWARD eller REVERSE knappene for velge den informasjonen du vil se eller endre.
2. Trykk og hold ADJUST knappen i to sekunder til det første tegnet begynner å blinke.
Bruk FORWARD eller REVERSE knappen for å velge ønsket bokstav.
Tips: Trykk og hold FORWARD eller REVERSE knappene for å bla fram ønsket bokstav.
3. Trykk MODE knappen for å gå til neste tegn og gjenta punkt 2.
Tips! Hold nede MODE knappen for å gå tilbake til et av tegnene i teksten.
4. Gjenta punkt 3 til informasjonen er ferdig skrevet.
5. Trykk ADJUST knappen for å lagre informasjonen og gå tilbake til DATABANK.
Trykk FORWARD eller REVERSE knappene for å velge ny DATABANK.
Trykk MODE knappen for å gå til annen meny.

Slik aktiveres alarm



Cadex Armbåndsursur har en hovedinnstilling som kan slå av eller på alle aktiverte alarmer på en gang. Denne kan være grei å bruke dersom man ikke skal bruke klokken over en lengre periode.

Slik betjenes hovedbryteren

Trykk MODE knappen en eller flere ganger til ”ACTIVATE” vises.

Bruk FORWARD eller REVERSE knappene for velge mellom yes og no.

YES =slår på alle aktiverte alarmer

NO =stenger alle aktiverte alarmer

Slik slås alarmen av

Når en alarm starter, vil klokken pipe i 1 minutt og alarmtidspunktet kan ses i displayet.

1) Trykk FORWARD eller REVERSE knappen *2 ganger* for å slå av alarmen.

2) Eller trykk 1 gang på FORWARD eller REVERSE, og klokken går inn i påminnerfunksjon, dvs. at alarmteksten fortsatt ses i displayet og klokken gir fra seg 2 pip hvert tredje minutt *til*

påminnerfunksjonen stenges ved å trykke på FORWARD eller REVERSE knappen.

Dersom flere alarmer starter på samme tidspunkt vil tekstene vises om hverandre. Dette kan resultere at klokken piper oftere enn hvert tredje minutt.

Bla i databanken

Trykk på ALERT knappen for å bla i databanken.

Man kan se all informasjon som er lagret unntatt ”CARD #”.

Slik slettes informasjon

Informasjon kan slettes på to forskjellige måter:

1. Nullstill klokken: Trykk og hold nede alle fire knappene på siden av klokken.
2. Enkeltalarmer eller informasjon i DATABANK kan slettes ved å erstatte med ny tekst eller ved å erstatte med tomme tegn.
Se ”Slik settes alarm” side 5.

Slik slettes tekst

Dette kan gjøres på to måter:

- 1) Skriv over bokstavene som skal vekk med tasten ”mellomrom”. Du finner dette tegnet som en blinkende understreking foran bokstaven A.
- 2) 0-still klokken.

Annet

Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap av informasjon som følge av feil bruk, feil innstilling, dårlig batteri eller lignende.

Cadex klokken anbefales brukt som et supplement til eventuelt epilepsimerke eller annen medisinsk informasjon og må ikke erstatte dette. Det anbefales å oppbevare en skriftlig kopi av alle data som lagres i klokken.

Teknisk spesifikasjoner

Batteri CR 2023 eller tilsvarende.

Batteriets varighet ca ett år avhengig av bruk.

Cadex Armbåndsur tåler vann fra dusj og badekar, men må ikke anvendes ved stuping eller dykking.

Innstillingsknappene må **ikke brukes** når klokken er i vann.

Klokka er nikkelfri og utført i rustfritt stål og plast.

Ved svært alvorlig allergi bør individuelle vurderinger vektlegges.

Sikkerhet

Falck Igel har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument.

Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør.

Falck Igel AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Falck Igel AS' økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet.

Det er ikke tillatt å kopiere denne brukerveiledningen uten skriftlig tillatelse av Falck Igel AS.

Har du problemer med hjelpemiddelet, ring 37 14 94 50.

Falck Igel AS

Risør

Buvikveien 22
4950 Risør
P.b. 123, 4952 Risør
Tlf (+47) 37 14 94 50
Fax (+47) 37 14 94 70

Oslo

Tevlingveien 15
1081 Oslo
Tlf (+47) 23 28 94 00
Fax (+47) 23 28 94 01

Bergen

Myrdalsveien 22
5131 Nyborg
Tlf. +47 55 91 64 30
Fax +47 55 13 62 20

Trondheim

Bromstadvegen 57
7047 Trondheim
Mob +47 95 21 66 33
Mob +47 47 46 27 22
Fax +47 74 14 59 54

post@falckigel.no
www.falckigel.no
