

BRUKERVEILEDNING for Medos II Klokke

Varenr: 500 321



Versjon november 2009



Innholdsfortegnelse

Om MeDos II.....	3
Klokkas funksjoner.....	3
Knappenes funksjoner	3
Still klokke	4
Still alarm	4
Slik velges vibrasjon eller lyd	5
Nedtellingsfunksjonen.....	5
MeDos virker ikke som den skal	6
Batteribytte	6
Sikkerhet.....	7

Om MeDos II

MeDos Klokke er et digitalt armbåndsursur med mulighet for å sette inntil 12 alarmer i døgnet. Klokka kan være et godt hjelpemiddel for den som trenger å bli påmint om f.eks. å ta medisinen.

Muligheten til å motta alarmene i form av vibrasjon, gjør at klokka egner seg godt for den som ønsker en diskret påminning. Den kan også være egnet til en som har problemer med å høre alarmen fra et armbåndsursur.

Klokka programmeres manuelt.

Klokkas funksjoner

Klokke, 12 Alarmer (ALM) og nedtelling (CDT).

Du kan velge om alarmene skal komme som vibrasjon eller lyd.

Bakgrunnsbelysning

Klokka har bakgrunnsbelysning som varer i 3 sek. Trykk D.

Klokkas hovedmenyer

Trykk C for å skifte meny, sekvensen er slik:

Klokke – Alarm (ALM) – Nedtelling (CDT).

Knappenes funksjoner

D)

*Innstillingsmeny
Bekreft
programmering
Bakgrunnslys*

C)

*Skift til neste
Skift meny*



A)

*Veksle mellom lyd,
vibrasjon og
lyd/vibrasjon
Opp*

B)

*Vis dato
Ned*

Still klokke

Sekvensen er slik: Timer, minutter, år, måned, dato og 12/24 timers klokke.

- Trykk C til klokka vises
- Trykk og hold D til timene blinker
- Still inn riktig time med A (opp) eller B (ned).
- Trykk C og minuttene blinker
- Still inn minutter med A (opp) eller B (ned).
- Trykk C og årstall blinker
- Still inn med A (opp) eller B (ned).
- Trykk C og måned vil blinke
- Still inn med A (opp) eller B (ned).
- Trykk C og dato vil blinke
- Still inn med A (opp) eller B (ned).
- Trykk C og 12 eller 24 timers visning vil blinke
- Still inn med A
- Trykk D for å bekrefte riktig innstilling

Still alarm

Sekvensen er slik: Timer, minutter, måned, dato, tidssone

Slik stiller du alarm

- Trykk C til klokka viser alarm menyen (ALM 1 til 12)
- Trykk A (opp) eller B (ned) for å velge den larmen du vil sette (ALM 1- 12)
- Trykk og hold D til timer blinker, alarmen vil nå automatisk bli slått på. Dette indikeres med "ON" bak minuttene i alarm klokkeslettet.
- Still inn timer med A (opp) eller B (ned).
- Trykk C og minutter blinker
- Still inn minutter med A (opp) eller B (ned).
- Trykk D for å avslutte og bekrefte.
- Trykk A (opp) eller B (ned) for å stille inn en ny alarm.

Slå av og på en alarm

- Trykk C til klokka viser alarm menyen (ALM 1 til 12)
- Trykk A (opp) eller B (ned) for å velge den larmen du vil slå av eller på (ALM 1- 12)
- Et kort trykk på D vil veksle mellom av og på (ON/OFF i displayet bak alarmklokkeslettet).

Slik velges vibrasjon eller lyd

Velges fra Klokke visningen menyen. (Trykk fram til klokke med C)

Trykk og hold A til symbolet oppe i venstre hjørne på klokken endres.

Et bølgesymbol indikerer kun vibrasjon.

Et bjellesymbol indikerer kun lyd.

Bølgesymbol og bjellesymbol indikerer både vibrasjon og lyd.

Nedtellingsfunksjonen

Minimum nedtellingsintervall i MeDos er 1 minutt, maksimum nedtellingsintervall er 100 timer, 0 minutter og 0 sekunder (over 4 dager, vises med 00:00:00 som starttid i displayet).

Stille inn nedtellingen

- Trykk C til du er i Nedtellingsfunksjonen (CDT)
- Trykk og hold D til timer blinker.
- Still inn timer med A (opp) eller B (ned).
- Trykk C og minutter blinker
- Still inn minutter med A (opp) eller B (ned).
- Trykk C og REP blinker oppe i høyre hjørne.
- Trykk A eller B for å veksle mellom repetisjon av og på.
To streker foran R (en oppe og en nede) indikerer at repetisjon er slått på. Ingen streker foran R indikerer at repetisjon er slått av.
Når repetisjon er slått på vil nedtellingen starte på nytt med en gang nedtellingen er ferdig.
- Trykk D for å avslutte og bekrefte.

Starte og stoppe nedtellingen

- Trykk C til du er i Nedtellingsfunksjonen (CDT)
- Trykk A for å starte nedtellingen.
- Klokkas vil gi signal (pip og/eller vibrasjon) når det gjenstår 3, 2 og 1 min av nedtellingen. 3 pip = 3 min, 2 pip = 2 min og 1 pip = 1 min igjen. Ferdig nedtelling signaliseres med pip og/eller vibrasjon i 30 sekunder eller til A trykkes.
- Nedtelling kan stoppes når som helst ved å trykke på A. For å starte nedtellingen fra der man stoppet den, trykk A en gang til. For å stille nedtellingstiden tilbake, trykk B

MeDos virker ikke som den skal

Klokka viser feil meny.

- Trykk på C og bla fram til du ser dag og tid.

Klokka gir signaler på feil tidspunkt.

- Trykk C til Timer-funksjonen (CDT) vises i displayet.
- Startes / stoppes med A, eller se i brukerveiledningens.6 for resetting av Timer.
- Trykk C til Stoppeklokke- funksjonen (Chron) ses i displayet.
- Startes / stoppes med A. Re-set med B.
- Sjekk at tid og alarmer har samme tidssone. Se side 4 om innstilling av Tidssone.

Alarmen vibrerer ikke, selv om klokka går

- Tid for batteribytte

Batteribytte

Batteriets varighet er ca. 1 år, avhengig av bruk

- Batteribytte anbefales foretatt av leverandør eller hos en urmaker.

NB! Klokken kan bare være uten strøm i ett minutt før lagrede data mistes. Skriv derfor ned all viktig informasjon før batteribytte.

Tekniske spesifikasjoner

- Batteriets varighet- ca. ett år, avhengig av bruk. Kortere tid dersom vibrasjon brukes som alarm.
- Batteri bør byttes av leverandør.
- Tåler vann fra dusj og badekar, men må ikke anvendes ved stuping eller dykking.
- Innstillingsknappene må ikke brukes når klokken er i vann.
- Klokka er nikkelfri. Metalldelen bak er av rustfritt stål.
Ved svært alvorlig allergi bør individuelle vurderinger vektlegges.
- Alarmerer i 30 sekunder.
- Stopp alarm ved å trykke inn hvilken som helst knapp.

Sikkerhet

Falck Igel har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument.

Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør.

Falck Igel AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Falck Igel AS` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet.

Det er ikke tillatt å kopiere denne brukerveiledningen uten skriftlig tillatelse av Falck Igel AS.

Har du problemer med hjelpemiddelet, ring 37 14 94 50.

Falck Igel AS

Risør

Buvikveien 22
4950 Risør
P.b. 123, 4952 Risør
Tlf (+47) 37 14 94 50
Fax (+47) 37 14 94 70

Oslo

Tevlingveien 15
1081 Oslo
Tlf (+47) 23 28 94 00
Fax (+47) 23 28 94 01

Bergen

Myrdalsveien 22
5131 Nyborg
Tlf. +47 55 91 64 30
Fax +47 55 13 62 20

Trondheim

Bromstadvegen 57
7047 Trondheim
Mob +47 95 21 66 33
Mob +47 47 46 27 22
Fax +47 74 14 59 54

post@falckigel.no

www.falckigel.no
