

BRUKERVEILEDNING

for

Falck 5005 MinneKlokka

Varenr. 500 400 med vibrasjon og lyd


Varenr. 500 401 med lyd

Varenr. 500 402 med vibrasjon



Versjon mai 2004

CE

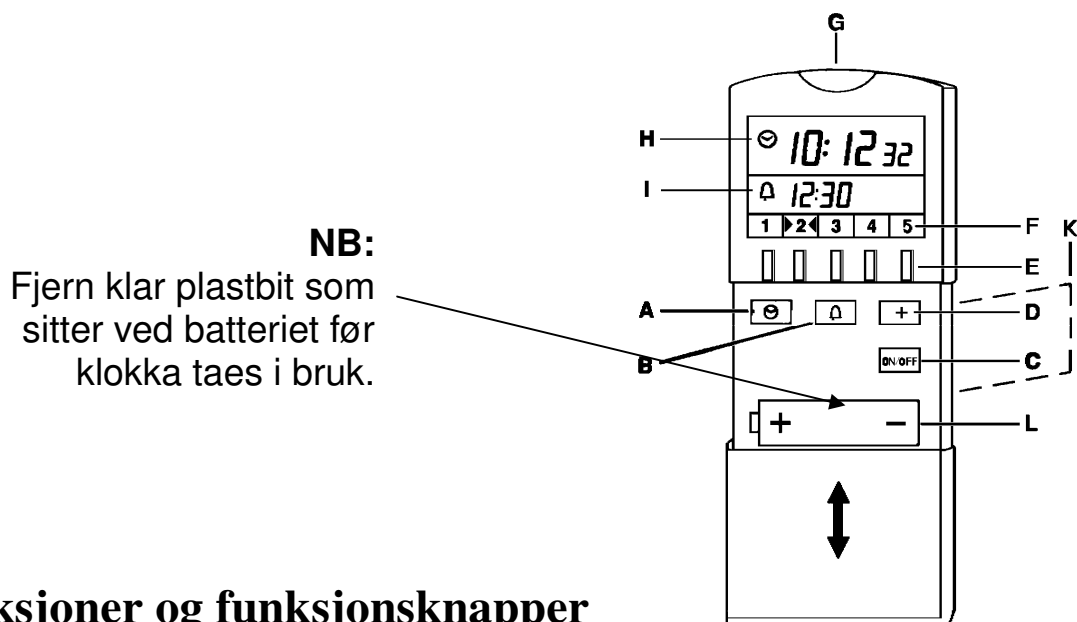

Funksjoner og funksjonsknapper

- A. Knapp for tidsinnstilling
- B. Knapp for alarminnstilling
- C. Alarm På/Av
- D. + knapp for innstilling av tid og alarm
- E. Knapper for alarmene 1 - 5
- F. Alarmindikator (Viser aktivert alarm)
- G. Alarm-stoppeknapp
- H. Kløkkesymbol og klokketid
- I. Alarmsymbol og alarmtid
- K. Bordstøtte (På baksiden av klokken - Trekk batteridekslet ned, vipp ut støtten og skyv dekslet på plass igjen)
- L. Batteri (1,5V AA/LR6-celle, vårt vnr. 220 215)

OBS!

Knappene **A-B-C-D** og batteriet kommer en til ved å trekke batteridekslet ned

Innstilling av riktig klokketid

Trykk knapp **A** (Kløgkesymbolet blinker)

Still inn riktig tid ved hjelp av knapp **D** (Ett trykk = 1 min. frem; holdes knappen inne, løper tiden)

Et nytt trykk på knapp **A** starter klokka. (Den starter også av seg selv etter 10 sek.)

Innstilling av alarmtidspunkter

Trykk ON/OFF knappen **C** til alarmsymbol og alarmtid blir synlig i displayet **J**.

Trykk knapp **B** (Alarmsymbolet blinker)

Trykk ønsket alarm. Knapp **E** (1-5)

Still inn ønsket alarmtid ved hjelp av knapp **D** (Ett trykk = 1 min. frem/holdes knappen inne løper tiden)

Et nytt trykk på knapp **B** starter programmet. (Programmet starter også av seg selv etter 10 sek.)

Viktig!

Ved bruk av alarm nr. 1 vil alarmsignalet vare i 120 sek. (F.eks. morgenvekking)

Ved bruk av alarmene 2-5 vil alarmsignalet vare i 20 sek. («Huske på» - signal)

OBS!

Alarmdisplayet viser kun den førstkomende alarmeren. (Se også pkt.7)

Fjerne et satt alarmtidspunkt

Trykk knapp **B**

Trykk knapp **E** for den alarmeren som skal fjernes

Trykk og hold knapp **D** til ordet "**OFF**" vises i displayet

Slipp knappen og den aktuelle alarmeren er fjernet.

Stoppe et alarmsignal

Trykk knapp **G**. Alarmeren stopper og neste alarmtidspunkt vises i displayet

Slå av alle alarmer

Trykk knapp **C**, og alle alarmtidspunktene forsvinner fra displayet

Et nytt trykk på **C** vil aktivere disse igjen

Se de andre alarmtidspunktene

Ved å trykke på, og holde, en av knappene **E** (1-5), vil en i displayet se det alarmtidspunktet som er satt.

Tekniske spesifikasjoner

Bytte av batteri

Hvis et batterisymbol vises til høyre for alarmtidspunktet, må batteriet skiftes ut med et nytt.

Pass på at polariteten blir riktig. (Se etter + - symbolet på plastdekslet)

Mål (l x b x d): 9,6 x 6,3 x 1,8 mm

Vekt inkl. batt.: 100 g

Rengjøring

Hjelpemiddelet kan rengjøres med en klut lett fuktet i lunkent såpevann, men må ikke nedsenkes i væske.

MinneKlokke med vibrasjon

Klokka vil vibrere sammen med - og like lenge - som alarmlyden (dersom man har modellen med både vibrasjon og lyd).

Det er viktig å få MinneKlokka så nært kroppen som mulig for å føle vibrasjonene bedre.

Benytt gjerne snoren som følger med, og heng den om halsen og innenfor skjorte / bluse el.l. (Prøv deg frem til beste resultat)

Om klokka blir stående på et glatt underlag mens den vibrerer, kan det føre til at den faller ned og ødelegges.

Sikkerhet

Falck Igel har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument.

Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør.

Falck Igel AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Falck Igel AS` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet.

Det er ikke tillatt å kopiere denne brukerveiledningen uten skriftlig tillatelse av Falck Igel AS.

Har du problemer med hjelpemiddelet, ring 37 14 94 50.

Falck Igel AS

Risør

Buvikveien 22
4950 Risør
P.b. 123, 4952 Risør
Tlf (+47) 37 14 94 50
Fax (+47) 37 14 94 70

Oslo

Tevlingveien 15
1081 Oslo
Tlf (+47) 23 28 94 00
Fax (+47) 23 28 94 01

Bergen

Myrdalsveien 22
5131 Nyborg
Tlf. +47 55 91 64 30
Fax +47 55 13 62 20

Trondheim

Bromstadvegen 57
7047 Trondheim
Mob +47 95 21 66 33
Mob +47 47 46 27 22
Fax +47 74 14 59 54

post@falckigel.no
www.falckigel.no
